

TODO ESTA EN NUESTRO NOMBRE!

MadaCide-FD

(FD) SECADO RAPIDO Y MAS...

Extermina la
fiebre Porcina
(H1N1)



✓ Un paso para
controlar las
infecciones
Rociador controlado
secado al aire

- ✓ Extermina MRSA
en 3 minutos
- ✓ Extermina VRE
en 5 minutos
- ✓ Extermina TB
en 6 minutos
- ✓ Extermina el Virus
de Sida en 30 segundos
- ✓ Extermina la
Hepatitis B & C
en 3 minutos



MADA, INC.

NACIONAL/INTERNACIONAL
625 Washington Avenue, Carlstadt, NJ 07072
Tel: 201-460-0454 • Fax: 201-460-3509

Para Ordenar visite Nuestra Red:
www.madamedical.com
o llame al: **201-460-0454**

MadaCide-FD Un producto de Mada, desinfectante y limpiador a nivel
Hospitalario que satisface sus requerimientos para el Control de Infección
UN NOMBRE DE CONFIANZA POR MAS DE 42 ANOS

MadaCide-FD

(SECADO RAPIDO)

Otra arma en la pelea por el Control de Infecciones

Uds lo pidieron!

ASI ES COMO TRABAJA:

ORGANISMOS	TIEMPO MINIMO REQUERIDO
Estafilococo Dorado (MRSA)	3 minutos
Mycobacteria bovis BCC (Tuberculosis)	6 minutes
Virus de Hepatitis B & C, Virus de la Polio I Seudomonas aeruginosa, Rhinovirus, Salmonela choleraesuis y Estafilococo dorado	3 minutes
Aspergillus niger, Candida albicans, Esterococo resistente a la Vancomicina (VRE), Rabia y Trichophyton mentagrophytes	5 minutes
Herpes Simple II, HIV-I (Virus del Sida) e Influenza A2/HK	30 seconds

MadaCide-FD es un producto registrado con EPA, asegurando que todo lo prometido y detallado en la etiqueta del producto es preciso y verificable.

**Es un Fungicidal, Seudomonacidal, Virucidal, Bactericidal y Tuberculocidal.*

**(Completa Actividad esta disponible)*

Su formula anti-corrosiva no daña los lentes, cemento, plástico, goma, acero, aluminio, bronce ni cualquier otro metal si es usado como se indicá.

Para la Limpieza de Instrumentos Quirurgicos:

Remueva todos los desperdicios biológicos del instrumento. Remoje el mismo en una solución sin diluir durante 10 minutos. Proceda con los pasos regulares de descontaminación.

AREAS DE USO:

Superficies duras en: Centro de Diálisis Renal, Cirugía, Recuperación, Anestesia, Rayos-X, Dptos. de Emergencias, Salas de Recién Nacidos, Terapia Respiratoria, Radiología y Almacenes Centrales. Aprobado para uso en Limpiadores Ultrasónicos

INFORMACION PARA ORDENAR:

*Nro. 7020 - 32 oz. Botella Aerosol.... 12/caja
Nro. 7021 - 1 Galón..... 4/caja
Nro. 7022 - 2.5 Galones..... each
Nro. 7023 - 5 Galones..... each
Nro. 7024 - 55 Galones..... each*



MADA, INC.

NACIONAL/INTERNACIONAL
625 Washington Avenue, Carlstadt, NJ 07072
Tel: 201-460-0454 • Fax: 201-460-3509

Para Ordenar visite Nuestra Red:
www.madamedical.com

O Llame al: **201-460-0454**

Distribuido Por: