


# SITIOS PARA LAS INYECCIONES CON EL MADAJET XL DENTAL




## ORIFICIO MANDIBULAR (Dos Inyecciones)

- #1. Inyecte con el MadaJet XL en la cara interna de la mandibula donde comenzará su inserción con la aguja.
- #2. Inyecte en la aproximación mas cercana al Orificio Mandibular.

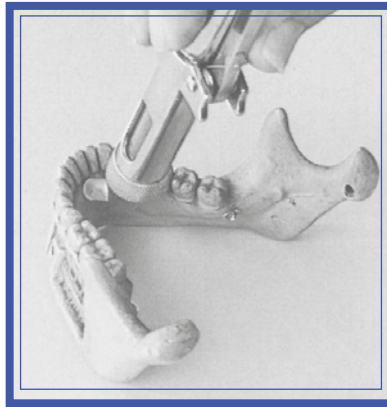


## MAXILAR INFERIOR (Superficie Lingual)

Inyecte el área de los alvéolos dentarios (que contienen las raices dentarias) en la cara interna de la mandibula.

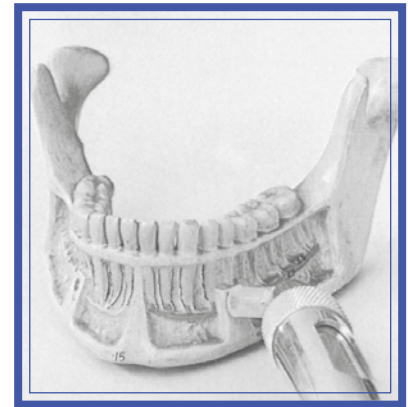


## MAXILAR INFERIOR (Orificio Mandibular externo)

Inyecte el Maxilar Inferior directamente sobre la cara externa en la sinfisis mentoniana mandibular y se logra anestesiarse el cuadrante completo. Para lograr una anestesia mas profunda, siga este procedimiento con otra inyección en el área lingual, por la cara interna de la mandibula.

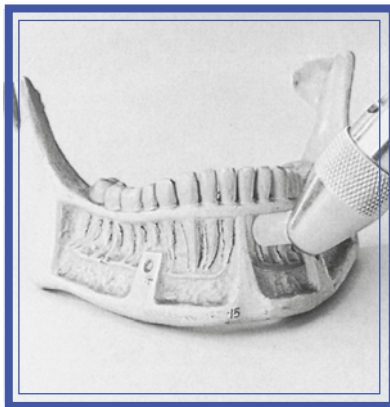


## MAXILAR INFERIOR (Incisivos)

Inyecte en el área de los alvéolos dentarios en la cara externa de la mandibula (ver ilustración). Para una anestesia mas profunda, inyecte con el MadaJet, cerca del area labial.

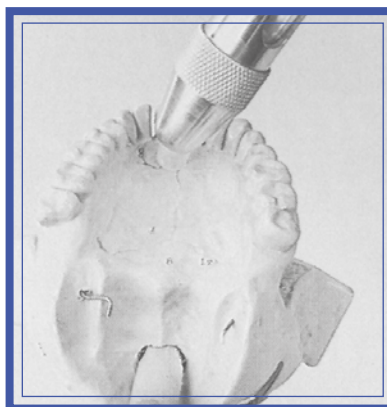

## MAXILAR SUPERIOR (Agujero Nasal Palatino)


Ponga dos inyecciones con el MadaJet XL, a cada lado de las papilas. Siga con 2/3 inyecciones en línea donde la aguja y jeringa deben ser dirigidas.

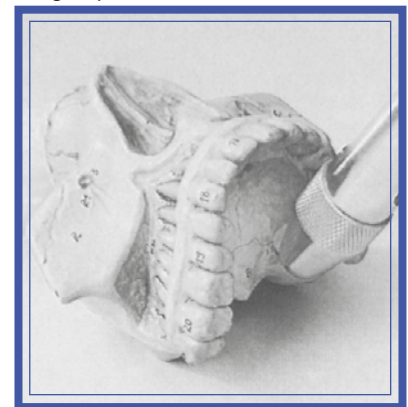

## MAXILAR SUPERIOR

(Agujero Nasal Palatino Posterior)


Ponga dos inyecciones con el MadaJet XL, a cada lado de las papilas. Siga con 2 o 3 inyecciones en línea donde la aguja y jeringa deben ser dirigidas.

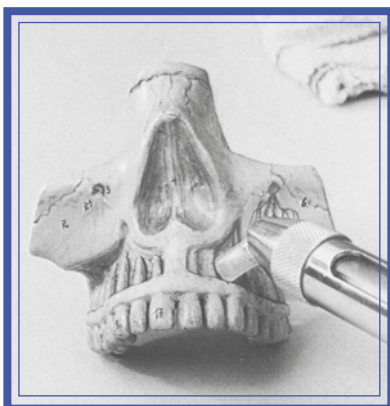

## MAXILAR SUPERIOR

(Agujero Palatino Anterior)

Inyecte en la cara externa del Agujero o directamente sobre el mismo.

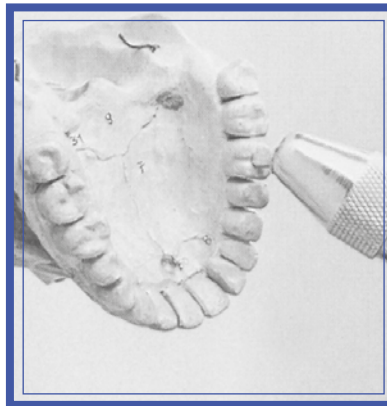

## INFILTRACION DE LA PULPA

Cuando las áreas de la pulpa en una canalización de la raíz esten todavía sensitivas, remueva la cubierta del MadaJet y si fuera necesario, inyecte directamente en el canal.

Para mas tecnicas e informacion pida la:  
**MadaJet XL Dental Presentation y Dental Applications y Techniques,**  
(Sin costo)



**MADA, INC.**

NACIONAL/INTERNACIONAL

625 Washington Avenue, Carlstadt, NJ 07072  
Tel: 201-460-0454 • Fax: 201-460-3509

Para Ordenar visite Nuestra Red:

[www.madamedical.com](http://www.madamedical.com)

O Llame al: **201-460-0454**